



SENNHEISER

All-Day Clear

即戴式：耳背式助听器

应用程序说明书简介



森海塞尔All-Day Clear助听器集清晰的聆听体验和与智能移动设备无线直连于一身，只需轻点几下即可实现各种功能。借助蓝牙®传输技术，All-Day Clear可与智能手机、平板电脑和笔记本电脑MFA蓝牙连接，实现免提通话以及在线流媒体播放。直观的APP操作确保简单而易于操作的设置和个性化定制。

这款助听器非常适合有轻度至中度听力损失的人群，此说明书可以帮助您实现轻松的自助验配。All-Day Clear有两种时尚的款式，均可确保全天候的舒适佩戴，机身仅重2.3g，并可在同一移动应用程序下进行功能操作和切换。All-Day Clear开箱即用，免电脑验配，提供便捷的用户体验，使用本应用程序引导消费者一步一步获得适合日常情况和环境的个性化听力体验。



APP安装和智能移动设备配对


1. 请扫描下方二维码进行APP下载和安装。



- 2. 完成APP安装后，请使用您的森海塞尔账号进行登录，或根据步骤进行新用户的注册。
- 3. 登录成功后根据页面提示进行助听器跟手机的蓝牙配对，或扫描下方二维码，根据视频指导进行助听器和手机等智能移动设备进行配对。




成功配对并进入APP后,您将进入设置引导,根据指引完成助听器的佩戴和参数设置,设置完成后即可看到下方页面。如需调整音频配置,请进入“音频配置”模块。

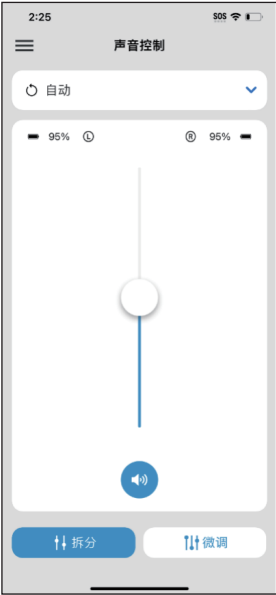

由于本产品采用即戴即用的听力解决方案,使用了先进的声音处理技术,您可直接通过上下拖动画面中间的圆形按钮,根据您的听音体验,选择自己需要的音量。同时您也可以通过All-Day Clear app轻松实现个性化设置,以满足您的聆听需求。您可以点击画面下方的“拆分”或“微调”按钮进行进一步的设置。音量调节按钮上方为左右两侧助听器的可视化电量显示,高性能可充电锂电池,至高可连续使用16小时,可为您提供全天候聆听支持。


音效模式切换

默认情况下, 你的助听器被设置为“自动”。这允许您的助听器地适应您的听力环境。如果你正在听现场音乐, 你可以选择“现场音乐”模式。它将为您带来更多可重复的现场聆听体验。您可点击画面上方的“自动”进行使用场景的切换, 此功能可以自动检测所在环境并对声音进行优化, 为语音和音乐提供更好的增强效果, 让声音鲜活灵动不失真。当您通过此处切换至“现场音乐”模式时, 可为您带来还原度更高的现场听音感受。

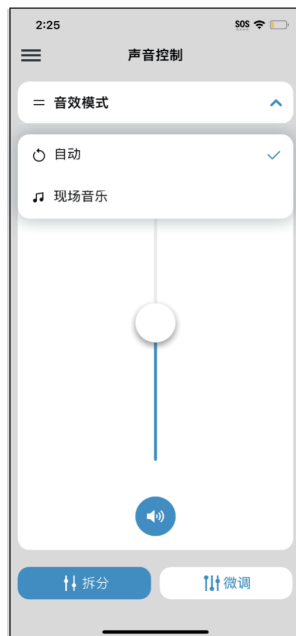

拆分功能介绍


此功能与主控制页面的使用相似,进入此项功能后您可以看到画面变为左右两个独立的音量调节按钮,可根据您左右耳不同的听力损失情况进行音量的调整,如下图所示:

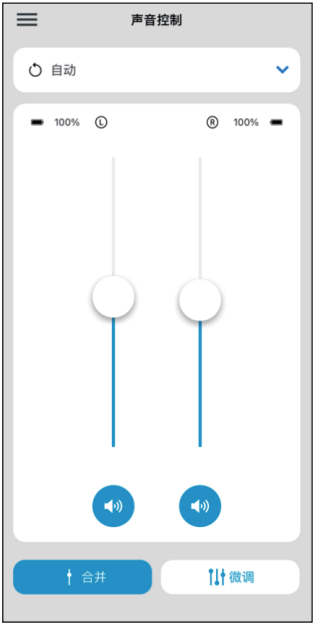

微调功能介绍


点击微调按钮可打开上图页面，在此您可以看到3段可调均衡器，分为高、中、低三个频段，可根据您的听力情况针对三个频段进行独立微调。下方有“降低风噪”的开关，可在您日常佩戴过程中降低风噪带来的影响。

另外您可通过购买额外的延保服务套餐激活1年延保服务，同时在我们的指定经销商处获得10段均衡器的微调服务(您可以通过拨打我们的400客服热线了解更多信息)。

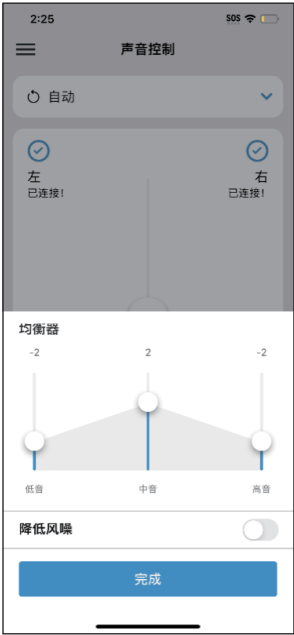

音频配置功能介绍


通过点击主控制页面左上角的图标，进入“我的助听器”，进入“音频配置”，此时您可看到下方页面。

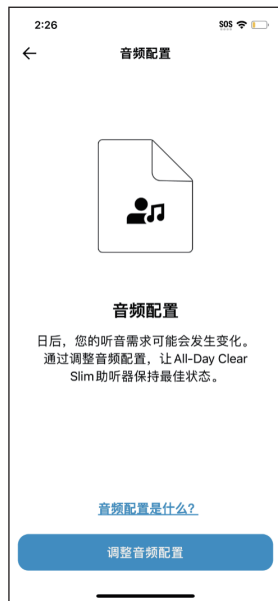

点击“调整音频配置”后，根据页面提示点击“是”，此时您可以根据页面提示及配置过程中的声音提示进行个性化设置，以根据您的实际情况满足聆听需求。

使用功能介绍

通过点击主控制页面左上角的☰图标,进入“我的助听器”,进入“使用”,此时您可看到下方页面,此页面中可以看到您的平均佩戴时间及倾听风格。为您提供日常佩戴信息供您参考。

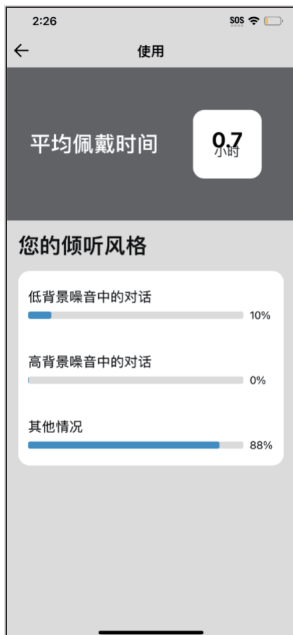

联系听力专业人士功能介绍

通过点击主控制页面左上角的☰图标,进入“支持”,进入“产品支持”,此时您可以看到下方页面,通过点击页面最下方的“请联系支持部门”进入我们的产品支持页面,进一步寻求更多的帮助,或拨打客服热线400-633-0150进行咨询。



产品清洁提示

当您看到以下画面提示时,请您点击“了解更多”以获得更多支持信息。



SENNHEISER